






Allergie-Diagnostika von EUROIMMUN: Die Sparte Allercostat™ 6 umfasst über 600 Parameter

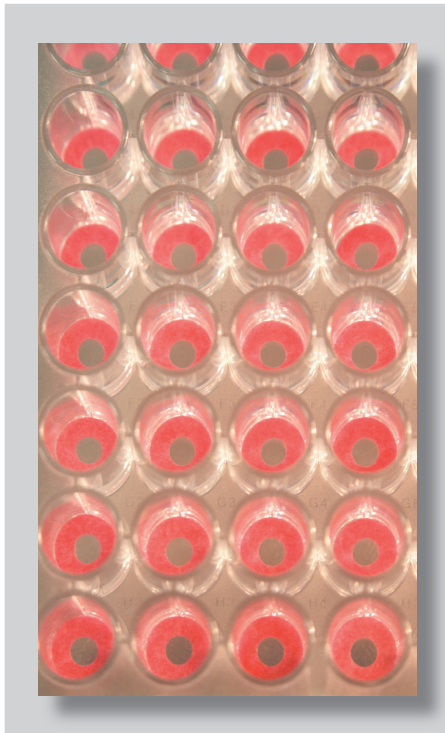

Allercostat™ 6

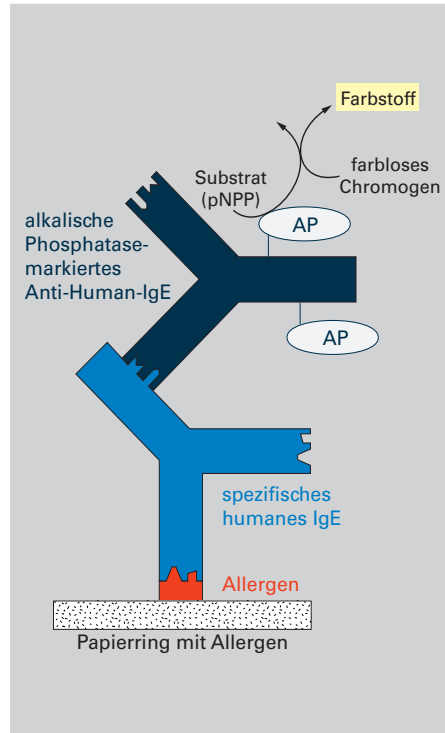

Testprinzip

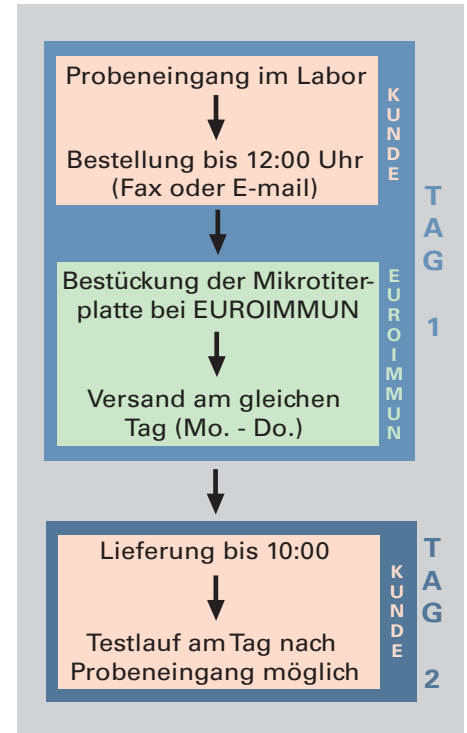

Optional: Vorbestückung von Mikrotiterplatten mit Allergenen

Technische Daten

| | |
|-----------------|--|
| Meßparameter | Spezifisches IgE gegen mehr als 600 Allergene für die serologische Diagnose der Typ-I-Allergie (Allergie des Soforttyps) |
| Testprinzip | Allergene sind an Papierringe gekoppelt; sie werden nacheinander mit Patientenserum, AP-markiertem Anti-human-Serum und Chromogenlösung inkubiert, die Menge des gebildeten Farbstoffs wird photometrisch gemessen |
| Kalibration | mittels Referenzpräparation 2 IRP 75/502 der WHO: 6-Punkt-Kalibrierung, quantitativ |
| Probenmaterial | Serum oder Plasma; 50 µl/Bestimmung, unverdünnt |
| Testablauf | 60 min / 60 min / 30 min. 37° C |
| Automatisierung | Der Test kann mit ELISA-Automaten durchgeführt werden. Als Hilfsmittel zur einfachen manuellen Durchführung des Allercostat™ 6-ELISA sind ein Lichttisch und eine spezielle Software erhältlich |
| Auswertung | Mit jedem handelsüblichen Photometer (405 nm); störungsfreie Messung direkt durch den Ring, die Allergen-beschichteten Papierringe brauchen nicht vorher entfernt zu werden |

Vorbestückung der Mikrotiterplatten mit Allergenen für höchsten Komfort

EUROIMMUN liefert Ihnen auf Wunsch nach Ihren individuellen Vorgaben vorbestückte Mikrotiterplatten. Ihre Bestellung senden Sie mit einer speziellen Software bequem online an EUROIMMUN. Dieses Vorgehen hat für Sie folgende Vorteile:

- **Platzsparend:** Keine Lagerung der Tests im Labor notwendig
- **Zeitsparend:** Mit dem Testlauf kann sofort nach Erhalt der vorbestückten Mikrotiterplatte begonnen werden
- **Geldsparend:** Seltene Allergene sind einzeln erhältlich und müssen beim Anwender nicht vorgehalten werden
- **Schnell:** Bestellung bis 12:00 Uhr, Lieferung bis 10:00 Uhr am nächsten Tag möglich